


BOOMERANG 15°

INSTRUCTIONS

Ce BOOMERANG 15° a été conçu surtout pour la radiographie du genou de profil à 15° de flexion. Pour plusieurs autres usages et pour des informations techniques générales, consultez la brochure ci-incluse ou la vidéo "LES FILTRES COMPENSATEURS OCTOSTOP® " par le Dr Jean A. Vézina M.D., président et conseiller médical de OCTOSTOP® Inc.

AVIS IMPORTANT: exceptionnellement, ce BOOMERANG 15° ne contient pas de chaînette localisatrice. Ceci est clairement indiqué sur la surface plane. Normalement, nous nous donnons un trouble considérable pour incorporer une chaînette opaque. En voici la raison: sans elle, si une corne se superposait accidentellement à une partie de l'anatomie, l'artéfact ainsi créé pourrait ressembler à une tumeur ou à une autre lésion. Ceci risquerait alors de causer une erreur diagnostique susceptible d'entraîner une poursuite légale. L'emploi de ce filtre sans chaînette est donc fait en toute connaissance des risques inhérents.

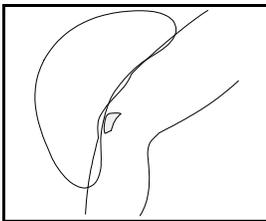


GENOU DE PROFIL EN FLEXION À 15°

Tel qu'illustré, il est recommandé de n'utiliser que le bout du filtre sur la région infra-patellaire seulement. Si le filtre est superposé à la région supra-patellaire, il y a risque de produire un artéfact qui ressemblerait à un épanchement intra-articulaire.

GENOU DE PROFIL EN EXTENSION COMPLÈTE

Le BOOMERANG 15° s'adapte difficilement à cette incidence. Il est alors recommandé d'utiliser plutôt le petit prisme. Avec rayon vertical, il n'y a aucun problème. Mais avec un rayon horizontal et une cassette verticale, (comme à la salle d'urgence), il faut le fixer au bon endroit, par exemple au moyen de bandes de Velcro® auto-adhésives collées sur la cassette tel qu'indiqué sur le schéma ci-contre.

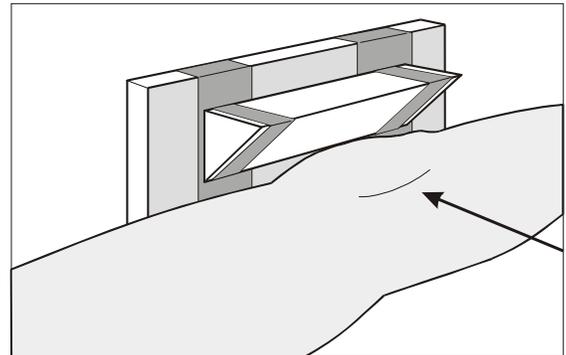

MISE EN GARDE

Doit être utilisé par un personnel compétent, selon des procédures appropriées, et sous la responsabilité d'un médecin. OCTOSTOP® Inc. et son personnel n'assument aucune responsabilité concernant l'emploi, les indications, les conséquences, ou toute situation directe ou indirecte en relation avec ses produits.