



1675, boulevard Saint-Elzéar Ouest
Laval, Québec, Canada H7L 3N6
T: 450.978.9805 SF: 1.888.422.7151

Pour le mieux-être des jeunes patients soumis à la radiologie, radiographie et à l'imagerie par résonance magnétique (IMR) ou nucléaire.

DEPUIS 1964

GUIDE DE L'UTILISATEUR
(Version française)

COUSSINS MOUSSE EN « U » ET EN « L »[®]

OCTOSTOP ne plastifie pas les coussins mousse en "U" et en "L", petits et grands, car cela produirait des effets non désirés dans les résultats des radiographies de bébés et d'enfants dans diverses positions.

OCTOSTOP conseille plutôt de les couvrir d'une pellicule moulante transparente de polyéthylène avant chaque examen et d'en disposer après usage.



COURROIES DE VELCRO ET COUVERTURES[®]

Les courroies de velcro et les couvertures, toutes grandeurs, peuvent être lavées après chaque usage jusqu'à ce qu'elles perdent leur efficacité. OCTOSTOP tient un inventaire de courroies de velcro et de couvertures de remplacement. Consultez la section « Accessoires » sous « Produits » de la page d'accueil du site Internet d'OCTOSTOP pour plus de détails.



AVERTISSEMENT

Doit être utilisé par un personnel compétent, selon des procédures appropriées, et sous la responsabilité d'un médecin.

Les bébés doivent rester constamment sous surveillance. En aucun temps les malades ne doivent être placés dans une position qui pourrait compromettre leur sécurité. Les signaux de **résonance magnétique** doivent être acquis de l'autre côté des lignes par rapport aux octogones.

OCTOSTOP[®] Inc. et son personnel n'assument aucune responsabilité concernant l'emploi, les indications, les conséquences, ou toute situation directe ou indirecte en relation avec ses produits.

OCTOSTOP[®] DÉTIENT UNE LICENCE D'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ CANADA



VISITEZ NOTRE SITE WEB À L'ADRESSE
[HTTP://WWW.OCTOSTOP.COM](http://www.octostop.com)
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : @OCTOSTOP