




1675, boulevard Saint-Elzéar Ouest  
Laval, Québec, Canada H7L 3N6  
T: 450.978.9805 SF: 1.888.422.7151



GUIDE DE L'UTILISATEUR

## LAVAGE ET ENTRETIEN DES COUVERTURES DE FLANELLE AVEC VELCRO®

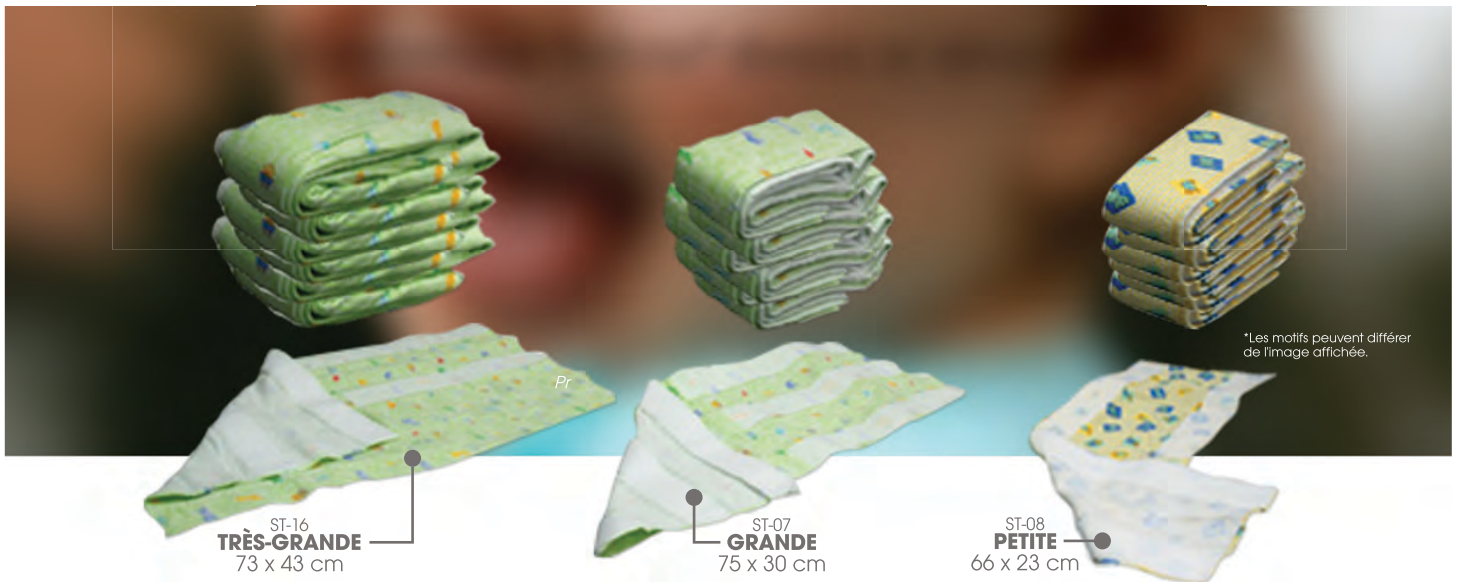

### *En guise d'introduction*

Les couvertures de flanelle avec Velcro® qu'OCTOSTOP livre à ses clients sont confectionnées à partir de matériel totalement neuf et sont pré-lavées avant leur emballage qu'elles soient utilisables sur réception.

### *Types de lavage*

Les couvertures de flanelle avec Velcro® peuvent être lavées aussi bien à sec qu'à la machine. En ce qui regarde le lavage à la machine, OCTOSTOP vous propose les étapes suivantes pour ce faire.

### *Instructions pour le lavage à la machine*

- \* OCTOSTOP recommande un lavage à l'eau tiède avec une petite quantité d'eau de javel.
- \* Un fois lavées, laisser sécher les couvertures de flanelle avec Velcro® à l'air ambiant.
- \* Les couvertures de flanelle avec Velcro® peuvent être repassées avec un fer à faible chaleur.
- \* OCTOSTOP recommande de laver régulièrement les couvertures de flanelle avec Velcro® afin d'assurer des conditions hygiéniques maximales pour chaque jeune patient.

OCTOSTOP® DÉTIENT UNE LICENCE D'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ CANADA

