



1675, boulevard Saint-Elzéar Ouest
Laval, Québec, Canada H7L 3N6
T: 450.978.9805 SF: 1.888.422.7151

NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Avis important

OCTOSTOP Inc nettoie et assainit tous les coussins et les filtres produits au moment de leur fabrication avec le désinfectant à surface 3M ID 700013-6243.

Le produit est reconnu pour éliminer les champignons, les virus et les bactéries en plus de détruire les bacilles de la tuberculose.

Le processus de nettoyage et d'assainissement n'altère pas les qualités et les caractéristiques physiques des produits d'OCTOSTOP. Une fois nettoyés et assainis, les coussins sont scellés et les filtres enveloppés avant d'être étiquetés comme tel.

OCTOSTOP recommande à tous les utilisateurs de nettoyer et d'assainir tous les éléments des produits avant d'en faire usage.



Types de nettoyage et d'assainissement

#1 Assainissement avec les lingettes 3M

- * **Durée:** 1 minute avant chaque examen
- * **Résultats:** Élimine les bactérie incluant le staphylocoque doré

#2 Assainissement avec le liquide 3M en vaporisateur

- * **Durée:** Vaporisez du liquide sur les coussins et les filtres et laisser sécher
- * **Résultats :** Fongicide • Bactéricide • Virucide • Tuberculocide. Désinfectant efficace contre les microorganismes.

Utilisations recommandées

- ⦿ **Avant chaque examen,** effectuez un nettoyage et un assainissement selon la méthode #1 Assainissement avec les lingettes 3M
- ⦿ **À la fin de la journée ou après le dernier examen de la journée,** effectuez un nettoyage et assainissement selon la méthode #2 Assainissement avec le liquide désinfectant de surface 3M en vaporisateur. **(verso)**

OCTOSTOP® DÉTIENT UNE LICENCE D'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ CANADA



Mise en gard

S'il advenait que le(s) coussin(s) et / ou le(s) filtre(s) ait(aient) été sali(s) ou taché(s) par des vomissures, du sang ou après avoir été en contact avec d'autres liquides corporels, nous recommandons de d'en disposer et de commander des pièces de remplacement.

Prenez note que les couvertures avec Velcro sont lavables à l'eau tiède et qu'un javellisant peut être utilisé. Voir les instructions à ce sujet sur le site Internet d'OCTOSTOP dans la section Documentation.

Method de nettoyage et d'assainissement avec le liquide désinfectant 3M en vaporisateur.

Préparation

- ✧ Toujours effectuer le nettoyage et l'assainissement dans un endroit bien aéré loin de la portée des enfants.
- ✧ Porter des accessoires de sûreté tel que des lunettes protectrices et des gants de caoutchouc ou en latex.
- ✧ Garder les produits de nettoyage et d'assainissement loin de la flamme ou des sources de chaleur importantes

Procédure

- ✧ Déposer le coussin ou le filtre sur une surface plane et propre
- ✧ Vaporisez abondamment le liquide désinfectant 3M sur et autour du coussin et / ou du filtre
- ✧ Laisser sécher
- ✧ Laver et remiser les lunettes protectrices et les gants en caoutchouc pour un usage ultérieur
- ✧ Remise de façon sécuritaire le liquide désinfectant 3M en vaporisateur dans un endroit loin de la portée des enfants.

AVERTISSEMENT

Doit être utilisé par un personnel compétent, selon des procédures appropriées, et sous la responsabilité d'un médecin. OCTOSTOP® Inc. et son personnel n'assument aucune responsabilité concernant l'emploi, les indications, les conséquences, ou toute situation directe ou indirecte en relation avec ses produits.