



OCTOSTOP

1675, boulevard Saint-Elzéar Ouest
Laval, Québec, Canada H7L 3N6
T: 450.978.9805 SF: 1.888.422.7151

TÊTIÈRE D'IMMOBILISATION®

PRODUITS CO-08 ET CO-09
GUIDE DE L'UTILISATEUR


CARACTÉRISTIQUES



- ✓ Compatible avec l'équipement NewTom 5G;
- ✓ Installation facile et rapide, la Tête d'immobilisation® offre une efficacité accrue lors des examens et des résultats supérieurs;
- ✓ En ligne avec la mission de notre entreprise, La Tête d'immobilisation® a été conçu en gardant à l'esprit le mieux-être des patients;
- ✓ La Tête d'immobilisation® a été développé avec la collaboration du centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

INSTRUCTIONS

1. Pour des raisons d'hygiène, OCTOSTOP recommande l'utilisation d'un bonnet d'infirmière bleu à usage unique.
2. Disposez et attachez les bandes crochets de couleur beige de 20,5 cm, aux grappins qui se trouvent de chaque côté de la table à la hauteur de la tête (Voir Illustration 1). Ils seront utilisés plus tard pour sécuriser la Tête d'immobilisation® à la table d'examen.
3. Un fois que le(la) patient(e) est allongé(e) sur la table d'examen, déposez doucement sa tête dans la tête. Il est recommandé d'exercer une légère pression vers l'extérieur sur les parois afin de bien insérer la tête pour que celle-ci repose confortablement dans la Tête d'immobilisation®.
4. Assurez-vous de bien stabiliser la tête du patient à l'intérieur de la tête à l'aide de la courroie Velcro® à bande coussinet centrale de 56 cm et des bandes crochets Velcro® situées de chaque côté de la Tête d'immobilisation®.
5. Dans un dernier temps, fixez la Tête d'immobilisation® à la table d'examen à l'aide de la longue bande de Velcro® blanche de 87 cm et des bandes crochets de couleur beige de 20,5 cm, préalablement disposées de chaque côté de la table à la hauteur de la tête (Voir Illustration 1).

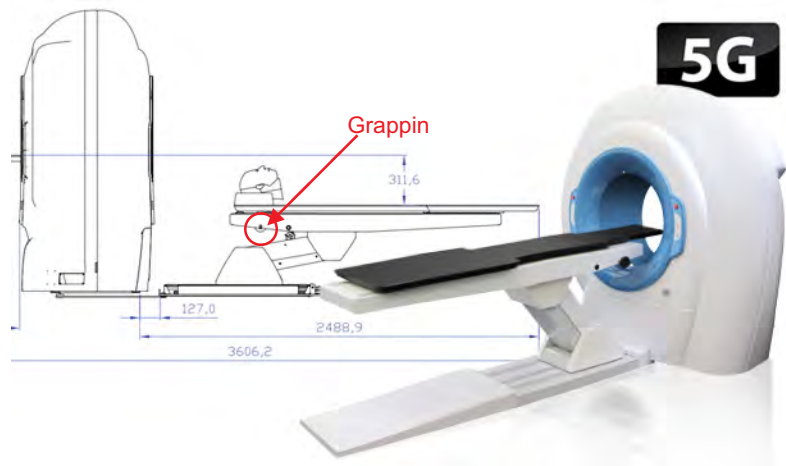

Conçus et minutieusement fabriqués dans nos installations, nos filtres compensateurs et nos solutions d'immobilisation pédiatrique de qualité supérieure sont brevetés. Ne faites aucun compromis sur la qualité, achetez les produits originaux OCTOSTOP®

OCTOSTOP® DÉTIENT UNE LICENCE D'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ CANADA

